

MESOTERAPIA



Art. DIY-105

Manual de instrucciones

Estimado cliente,
Muchas gracias por elegir nuestro producto!
Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. Guarde este manual para futuras consultas y referencias

BREVE INTRODUCCIÓN

Método de inyección sin aguja es un tratamiento eficaz, indoloro, seguro, y una alternativa no invasiva a la mesoterapia tradicional. Mediante electroporación y electro-ósmosis se consigue nutrición de los profundos células, drenaje linfático, promover el metabolismo, la linfa y la circulación de la sangre, así como para reducir las arrugas, blanquear la piel y mantener la humedad, tratamiento la celulitis, acelerar la disolución de la grasa y reducción de peso. Comparando con los productos de cuidado de piel, absorben con eficacia productos mucho más alto, fondo de resolver los problemas de los productos sólo quedarse en la epidermis, acortar el período de tratamiento.

Teoría del funcionamiento

Utiliza la electroporación y electroosmisis técnicas, sin ningún tipo de inyectores, fácilmente se abre la acuaporina (AQP), que permite la introducción de nutrición de forma localizada, solucionando múltiples problemas de la piel. Esto permite la nutrición rápidamente absorbido y eficaz, promover el metabolismo de la piel, mantener la piel elástica y fina.

AQP es el principal canal de agua dentro y fuera de las células.

¿Que es la electroporación y electroósmosis?

La electroporación: afectar directamente en la piel al instante mejorar la penetración en el tejido de la piel. Consiste en la emisión de una onda electromagnética (con predominio del campo eléctrico) pulsada, atérmica y no ionizable con la finalidad de producir una alteración en el potencial de membrana. Ésta alteración provoca una electro rotación de los lípidos con la consiguiente apertura momentánea de la membrana celular (poros) para el ingreso de sustancias hacia su interior. Este mecanismo tiene la particularidad de ser reversible y transitorio debido a la característica de la corriente: pulsada, no constante.

Con la aplicación de electroósmosis aumenta la permeabilidad de las células superficiales de la piel, lo cual modifica la estructura molecular de los lípidos y genera cambios en la configuración externa e interna de la piel. Este método se invierte en polaridad eléctrica que, de este modo, consigue activar el líquido retenido dentro de los nódulos que está mezclado con el tejido adiposo y otras toxinas.

Campos de aplicación:

Eliminación de las manchas y blanqueamiento de la piel.

A través de los canales intracelulares abiertos se absorben los principios activos, mejorando el metabolismo de las células, favoreciendo a la renovación celular.

Eliminación de arrugas y líneas de expresión: gracias a la acción del electrodo los nutrientes penetran en las capas de la piel más profundas, favoreciendo a la renovación celular, eliminando las arrugas desde las capas profundas de la piel.


Tratamiento de acné: mediante la acción de micro corriente se inyectan las sustancias activas, eliminando el foco de las bacterias.

Hidratación profunda: mediante la acción de micro corriente y aplicación de sustancias hidratantes, la piel se rehidrata, recupera el volumen, luce joven y tersa.

COMPARATIVA ANTES Y DESPUÉS



MESOTERAPIA Y PANEL FRONTAL

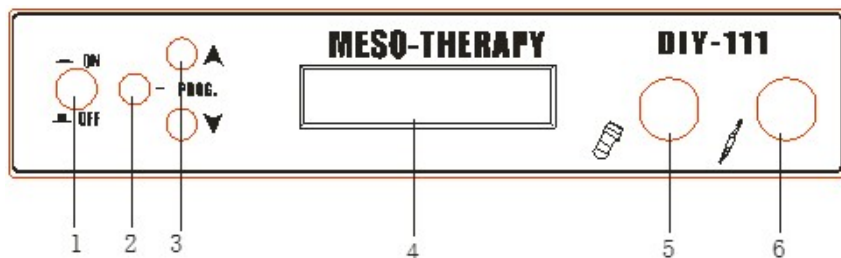




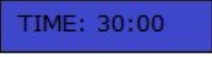



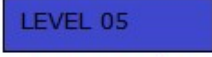

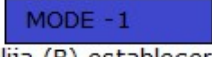

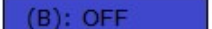
1. Encender/Apagar
2. Confirmación de las funciones
3. Ajustes y parámetros
4. Pantalla del menú
5. Puerta de mesoterapia
6. Puerta de lifting

- TIEMPO 1-60 minutos
- NIVEL 1-20
- MODO (M1=10Hz, M2=15Hz, M3 =20Hz, M4=60Hz)
- (B): Apagar/Encender mesoterapia
- (F): Apagar/Encender termocool



lifting

mesoterapia

1. Inicie la máquina por  (panel de control 1, mostrar la siga)
 -  imagen 1
2. Pulse la tecla de función de confirmación  elija el tiempo (panel de control 2)
 -  imagen 2
3. pulse ajuste de parámetros  establecer el tiempo de 15 minutos
 -  imagen 3
4. Pulse la tecla de función de confirmación  ajuste la intensidad (panel de control 2.3)
 -  imagen 4
5. Pulse la tecla de función de confirmación  elija de modo (panel de control 2.3)
 -  imagen 5
6. Pulse la tecla de función de confirmación (panel de control 2.3)  elija (B) establecer el estado de la mesoterapia
 -  imagen 6

TRATAMIENTO

1. LIFTING DEL CONTORNO FACIAL, ELIMINACIÓN DE LAS ARRUGAS

Elija el manípulo de lifting

Tiempo recomendado: 15 minutos (imagen 1)

Intensidad 15 (imagen 2)

Modo 1 (imagen 3)

Aplique el gel para eliminación de las arrugas en la cara del cliente

Inicie el tratamiento (imagen 4)





 imagen 1

 imagen 2


 imagen 3

 imagen 4


Proceda según indica el dibujo

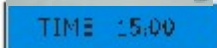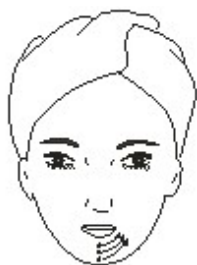

Paso 1

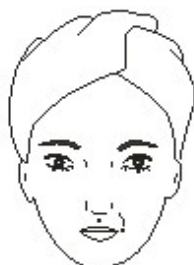


Paso 2

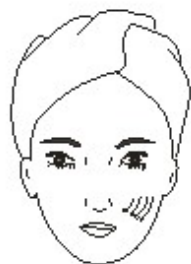


Paso 3



Paso 4

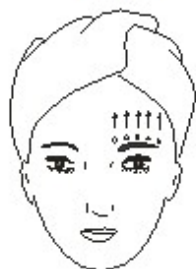

Paso 5

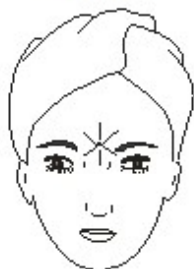

Paso 6

TRATAMIENTO

2. ELIMINACIÓN DE MANCHAS, HIDRATACIÓN, ELIMINACIÓN DE ARRUGAS

Elija el manípulo de mesoterapia



Extienda un poco de crema/gel en el cabezal del manípulo (como muestra el dibujo)



Paso 1
Tornillo de parte oro



Paso 2
Tornillo de la botella de vidrio



Paso 3
Tornillo de la tapa de la botella



Paso 4
Poner la crema/gel para el cuidado de la piel en la botella

Tiempo aconsejado: 8 minutos (imagen 1)

TIME = 08:00

imagen 1

Intensidad 12 (imagen 2)
(Ajustar de acuerdo a la duradera de los clientes)

LEVEL 12

imagen 2

Modo 1 (imagen 3)

MODE - 1

imagen 3

Comience el tratamiento

Pantalla como en la imagen 4

(B): ON

imagen 4

Proceda según indicado en la imagen 5

Mueva el manípulo en forma de espiral (frente, lado izquierdo de la cara, lado derecho, barbilla, cada parte 2 minutos)



imagen 5

Observaciones: El de arriba sólo ajuste de la piel natural (la piel saludable).

PARA CADA CASO, SELECCIONE EL PROGRAMA ADECUADO

1. Piel extra seca: madura, con manchas.		
Tiempo: 13-15 minutos	Intensidad: 3-5	Modo 4
2. Piel seca: con finos capilares de color rojo		
Tiempo: 10-12 minutos	Intensidad: 3-5	Modo 4
3. Piel grasa		
Tiempo: 8 minutos	Intensidad: 3-5	Modo 4
4. Piel con acné (no muy sensible)		
Tiempo: 8-10 minutos	Intensidad: 3-4	Modo 3
5. Piel sensible (sin alteraciones)		
Tiempo: 8-10 minutos	Intensidad: 3-4	Modo 2

AVISO. PROHIBIDOS

1. No utilizar este aparato en las personas con piel alérgicas, heridas.
2. No utilizar en pacientes que padecen enfermedades del corazón, ni en las personas que tienen cualquier aparato eléctrico o rítmico de regulación del corazón o cualquier otro dispositivo médico en el cuerpo.
3. No utilizar en las mujeres embarazadas.
4. Las personas con enfermedad mental.
5. Desinfectar el instrumento antes de la aplicación.
6. Guardar el aparato en el lugar seco.
7. Antes de la aplicación asegúrese de que el cliente quite las goyas y confirme que no tengan ningún implante de metal (tornillos en las articulaciones, etc.),
8. Elija crema o gel adecuado para el tratamiento.

EN CASO DE NO FUNCIONAR EL EQUIPO

Mal funcionamiento	Soluciones
No funciona al encenderse el equipo (encendido sin respuesta)	Comprobación de la alimentación si bien conectado
	Comprobación de la alimentación si se ha encendido
No sale ningún resultado	Comprobar si se han conectado bien los accesorios
El equipo se recalienta cuando está funcionando	Usado por mucho tiempo, debe apagar el equipo y dejar enfriar en forma natural
	Comprobar si el aparato está bien (mediante profesionales)
No se enciende	Compruebe si el fusible está roto, si es así reemplazar a otro

PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje: 100 V 110 V 220 V 240 V
 Frecuencia: 50 Hz 60 Hz
 Peso bruto: 2 kg
 Potencia: 10 W
 Tamaño embalaje (cm): 33 * 22 * 17

LISTA DE EMPAQUE

Descripción	Unidad	Cantidad	Comentario
Unidad principal	set	1	
Manípulo lifting	pieza	1	
Manípulo mesoterapia	pieza	1	
Cable	pieza	1	0.5 mm ²
Manual de instrucciones	pieza	1	

DECLARACIÓN DE CONFIRMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Por favor, no desmonte el equipo ni trate de hacer alguna otra manipulación, no indicada en el este manual. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico debidamente cualificado. En caso de necesitar una reparación, por favor, póngase en contacto con el proveedor.
2. Por favor, no monte ni utilice este equipo, con las manos mojadas, en las zonas húmedas o cerca del agua. No vierta líquidos en el equipo.
3. Por favor, desenchufe el equipo de la toma de corriente y póngase en contacto con profesionales de mantenimiento técnico cuando se encuentre en las siguientes condiciones:
 - (1) El equipo ha estado en contacto con el líquido
 - (2) El equipo tiene olor anormal, emite humo o alto y fuerte ruido.
 - (3) El cable está roto
 - (4) El equipo se ha caído y se ha roto
4. Por favor, no ponga nada en los cables, no coloque el equipo en el lugar donde alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, para su seguridad, desenchufe el equipo después de usarlo.

6. No coloque nada en el conector del equipo, esto puede causar fuego o cortocircuito. Si por casualidad un objeto entra en el equipo, no intente sacarlo. Pónganse inmediatamente en contacto con distribuidor
7. El cable de alimentación o dañado, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Mantenga el aparato fuera de alcance de los niños.
10. La empresa se reserva el derecho de modificar la información en esta introducción antes de notificar! Y que las explicaciones a la derecha de la anterior.