



NEO BEAUTY BCN, S.L.U  
Oficina: AVDA. CARRILET, 243, PLANTA 1,  
PUERTA 3B, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT  
(08907 BARCELONA)  
[www.neobeautybcn.com](http://www.neobeautybcn.com)  
[info@neobeautybcn.com](mailto:info@neobeautybcn.com)  
+34 629 523 166

# BROSSAGE CEPILLOS ROTATIVOS




Art. DIY-106

## Manual de instrucciones

Estimado cliente,  
Muchas gracias por elegir nuestro producto!  
Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar  
el equipo. Guarde este manual para futuras consultas y  
referencias.

## BROSSAGE Y PANEL FRONTAL

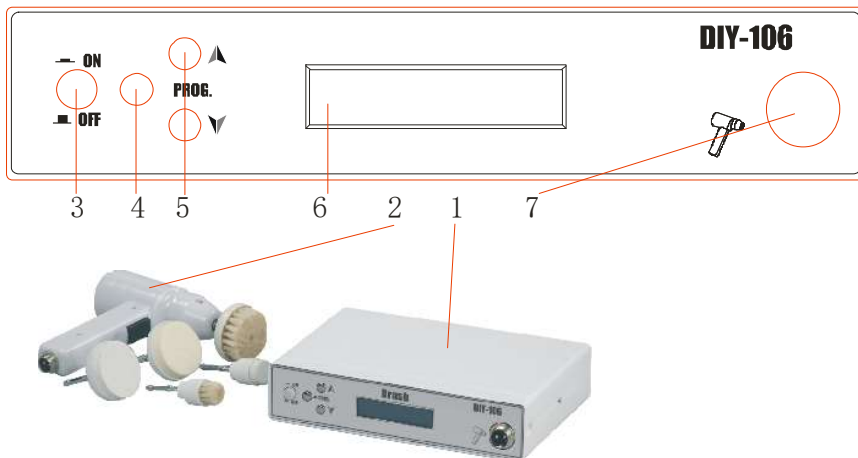

1. DIY-106 unidad principal
2. Manípulo y cepillos
3. Encender / apagar
4. Seleccionar menú

5. Ajustes del menú
6. Pantalla del menú
7. Puerto cepillo rotatorio

## FUNCIONAMIENTO

Este aparato es apto para cualquier tipo de piel y después de la operación no influye en la vida diaria.

1. Mejora la textura de la piel.
2. Suaviza la piel
3. Limpia los poros.

## BROSSAGE. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

1. Conecte el manípulo del cepillo a la unidad principal.
2. Elija el cepillo teniendo en cuenta el tipo de la piel.
3. Encienda el aparato y ajuste la velocidad.
4. Aplique el masaje con el cepillo durante 15-20 minutos.
5. Al terminar el trabajo, y antes de extraer el cepillo, apague el equipo.

## AVISO

1. En los 7 días posteriores después del brossage no aplique exfoliación ni cremas abrasivas.
2. Mantengase alejado de lugares calientes.
3. Evite rayos directos del sol.
4. Puede aplicar peeling de nuevo solo pasados 4 semanas.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje: 100-110 V 220-240V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Peso bruto: 1,5 kg  
Potencia: 10 W  
Tamaño embalaje (cm): 32 \* 21,5 \* 16,5

## LISTA DE EMPAQUE

Descripción	Unidad	Cantidad	Comentario
Unidad principal	set	1	
Manípulo rotativo con cabezales	set	1	
Cable de alimentación	pieza	1	
Manual de instrucciones	pieza	1	

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC.
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC.

## RECICLAJE

Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

## AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Por favor, no desmonte el equipo, ni trate de hacer alguna otra manipulación no indicada en el este manual. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico debidamente cualificado. En caso de necesitar una reparación, por favor, póngase en contacto con el proveedor.
2. Por favor, no monte ni utilice este equipo, con las manos mojadas, en las zonas húmedas o cerca del agua. No vierta líquidos en el equipo.
3. Por favor, desenchufe el equipo de la toma de corriente y póngase en contacto con profesionales de mantenimiento técnico cuando se encuentre en las siguientes condiciones:
  - (1) El equipo ha estado en contacto con el líquido.
  - (2) El equipo tiene emite un olor anormal, humo o un alto y fuerte ruido.
  - (3) El cable está roto.
  - (4) El equipo se ha caído y se ha roto.
4. Por favor, no ponga nada en los cables, no coloque el equipo en el lugar donde alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, para su seguridad, desenchufe el equipo después de usarlo.
6. No coloque nada en el conector del equipo, esto puede causar fuego o cortocircuito. Si por casualidad un objeto entra en el equipo, no intente sacarlo. Pónganse inmediatamente en contacto con distribuidor
7. Si el cable de alimentación se ha dañado, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o bien, contacte con el proveedor.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Mantenga el aparato fuera de alcance de los niños.
10. La empresa se reserva el derecho de modificar la información de este instructivo.